

0914-02  
2020.June.08  
修订日期: 2020年6月8日

# 合成取卵液 SynVtro® Flush

产品编号.

1584

【客户服务】

电子邮件: [Sales@coopersurgical.com](mailto:Sales@coopersurgical.com)






ORIGIO a/s  
Knardrupvej 2, 2760 Måløv, Denmark  
[www.fertility.coopersurgical.com](http://www.fertility.coopersurgical.com)  
电话: +45 46790200

# origio

a CooperSurgical Company

合成取卵液 ( SynVtro® Flush ) 使用图示

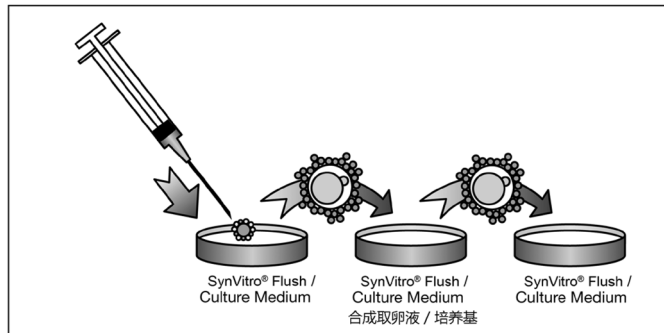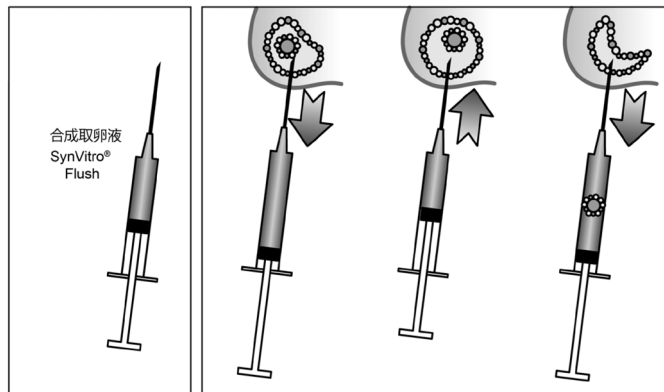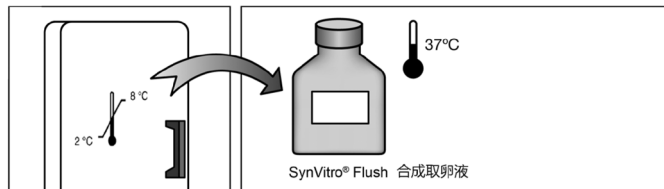

# 合成取卵液

## SynVitro® Flush

用于获取、保持及清洗卵母细胞

**产品：**  
1584 合成取卵液

**含有：**  
重组人胰岛素

### 质量控制检测

无菌试验合格（欧洲药典；美国药典）  
渗透压试验合格（欧洲药典；美国药典）  
pH值检测合格（欧洲药典；美国药典）  
内毒素试验合格， $\leq 0.1$  EU/mL  
(欧洲药典；美国药典)

小鼠胚胎试验（MEA）合格

注：每批次的结果记录于分析证书，

查询可登录 [www.fertility.coopersurgical.com](http://www.fertility.coopersurgical.com)

### 贮存说明和稳定性

产品为无菌加工，无菌包装。

在原有容器内于2-8°C避光贮存。

禁止冷冻。

加温后丢弃多余（未使用）的合成取卵液。

本产品分小瓶包装以供一次性使用。

若能按照产品生产商的说明进行贮存，在瓶子标签上显示的失效期以前产品性能稳定。

### 注意事项和警告

出现以下情况不要使用：

1. 产品包装出现损坏或密封破损。
2. 产品过期。

**警告：**该产品供一次性使用，由于有污染风险，不得重复使用




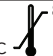




**警告：**卵母细胞在体外对pH变化和短暂冷却极度敏感，不大的温度波动会导致减数分裂时的纺锤体破裂，造成染色体的消散。

**注意：**预温过程中瓶盖应拧紧。

### 【使用说明】

1. 将合成取卵液预温至37°C。
2. 在卵母细胞收集及运送至胚胎学实验室的整个过程中利用加热块将合成取卵液的温度保持在37°C。
3. 将合成取卵液吸于冲洗卵泡的注射器内。吸取卵泡液并用与收集的卵泡液体积相当的合成取卵液冲洗卵泡。注意不要使卵泡膨胀超过原始大小。
4. 用合成取卵液或预平衡的培养基冲洗卵母细胞，小心去除血块和颗粒细胞
5. 将卵母细胞转移至预平衡的培养基中，于37°C、5-6% CO<sub>2</sub> 条件下保存。

（使用图示见下页）

标志：	
批号	
生产日期	
有效期	
贮藏温度	 2°C - 8°C
无菌过滤	
警告	
查阅使用说明	
制造商	

医疗器械注册证书编号：国械注进20153181212

产品技术要求编号：国械注进20153181212

产品型号：15840125F

注册人/生产企业名称：ORIGIO a/s 澳励晶

注册地址：Knardrupvej 2, 2760 Malov, Denmark.  
(丹麦)

生产地址：Knardrupvej 2, 2760 Malov, Denmark.  
(丹麦)

代理人/售后服务单位：澳励晶贸易(上海)有限公司

地址：上海市杨浦区翔殷路1088号12层01室

生产日期：见标签

使用期限：26周

电话：021-65637022

传真：021-65637023