

O que dizem as pessoas sobre o Sistema RI Witness™?



“ Desde que comecei a usar o RI Witness no meu laboratório, os embriologistas dormem melhor e os pacientes também. ”

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, França

“ O RI Witness permitiu ao nosso pessoal de laboratório realizar os procedimentos com total confiança e sem interrupções contínuas, dando a todos os membros da equipa paz de espírito. ”

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute
Oak Brook, EUA


Porquê utilizar o Sistema RI Witness™?

Sabemos que os embriologistas são alguns dos profissionais mais dedicados e exigentes que se podem encontrar. Orgulham-se dos cuidados e atenção que prestam a todos e cada um dos seus pacientes.

Desde a primeira utilização do RI Witness por parte de uma clínica em 2007, temos continuado a trabalhar em estreita colaboração com líderes no terreno para melhorar constantemente este sistema de apoio e salvaguarda que ajuda e orienta os embriologistas ao longo de todo o ciclo de FIV.

Ajuda a assegurar que cada passo do ciclo de fertilidade, dentro do laboratório, é gerido de forma adequada e segura, ajudando a manter a segurança das suas amostras.

O RI Witness está a tornar-se cada vez mais o padrão de segurança nas clínicas de todos os continentes em todo o mundo.¹

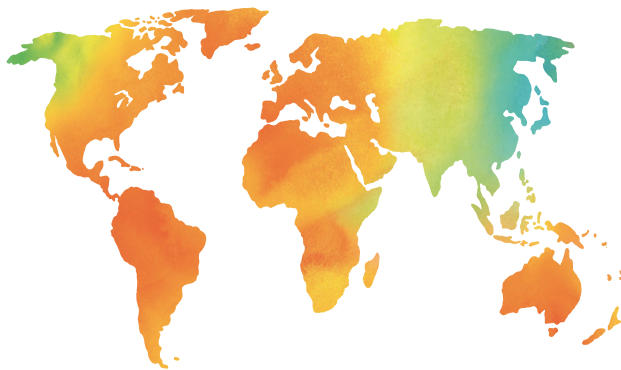

Para mais informações, incluindo vídeos e testemunhos de clientes, visite:

coopersurgical.com

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha, Chand Mohammed and Keshav Malhotra. Errors in IVF laboratories: risks assessments and mitigations. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Electronic witness system in IVF - patients perspective. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Failure mode and effects analysis of witnessing protocols for ensuring traceability during IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516-522.

© CooperSurgical, Inc. As marcas comerciais aqui utilizadas são propriedade da CooperSurgical, Inc. WIT_FLY_0006_ROW_PT_V3 - 29 DE NOVEMBRO DE 2023
Todos os direitos reservados. Encomenda n.º
Todas as informações estão corretas no momento da impressão. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigação por parte do fabricante.

RI Witness™ Sistema de Segurança para Amostras

Ajudando a salvaguardar os seus ovos, espermatozoides e embriões durante o ciclo de FIV





Compreendemos que queira saber que está tudo a ser tratado enquanto embarca numa viagem de mudança de vida.²

O que é o Sistema RI Witness™?

O RI Witness foi criado para ajudar a prevenir a ocorrência de eventuais erros durante os ciclos de tratamento ART. Este sistema de certificação eletrónica presta apoio e orientação aos embriologistas no seu trabalho diário através do rastreio do movimento de amostras a partir de uma placa ou tubo para outro dentro do laboratório 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Este sistema é automático, pelo que não requer passos adicionais por parte dos embriologistas para identificar amostras. Isto significa que o embriologista pode prestar toda a sua atenção ao cuidado das suas amostras.

O que é que isto significa para si?

Escolher uma clínica com o RI Witness instalado permite-lhe ter a certeza de que as suas amostras estão a ser rastreadas eletronicamente ao longo do seu ciclo de FIV. A clínica investiu num sistema que proporciona a maior segurança possível para a salvaguarda das suas amostras.³

Uma clínica com RI Witness coloca-o na vanguarda das suas prioridades e prova que a tomada de medidas e precauções adicionais é o centro da sua filosofia.



Como funciona?



1 É atribuído a cada paciente um cartão de identificação/ código pessoal único.




2 As etiquetas de identificação que contêm este código pessoal único são afixadas a todos os objetos de plástico que contêm as respetivas amostras do paciente e do dador.

3 Cada área de trabalho do laboratório deteta sinais sem fios a partir destas etiquetas de identificação.

São identificados, rastreados e registados a cada passo do processo de P.M.A.



4 O RI Witness confirma a identidade das amostras e permite aos embriologistas prosseguirem com a inseminação.

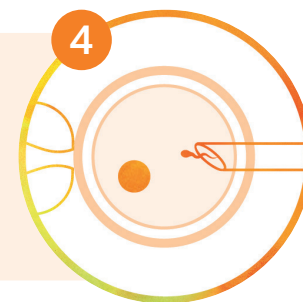

5 Na improvável eventualidade de as amostras não corresponderem, o sistema alerta o embriologista, interrompe os procedimentos e ajuda a evitar potenciais erros.



6 Antes da transferência de embriões, o cartão de identificação do paciente é automaticamente verificado contra a placa de embriões etiquetada.

O Sistema RI Witness™ ajuda a salvaguardar as suas amostras durante os processos de P.M.A. - desde o princípio até ao fim