

精子冻存液

Sperm Freezing Medium

产品编号.

1067



0543

【客户服务】

电子邮件: customer.service@origio.com

电话: +45 46 79 02 02

传真: +45 46 79 03 02



ORIGIO a/s
Knardrupvej 2, DK-2760 Måløv, Denmark


www.origio.com

电话: +45 46 79 02 00

传真: +45 46 79 03 00

origio MEDICULT
MEDIA

精子冻存液 (Sperm Freezing Medium) 使用图示

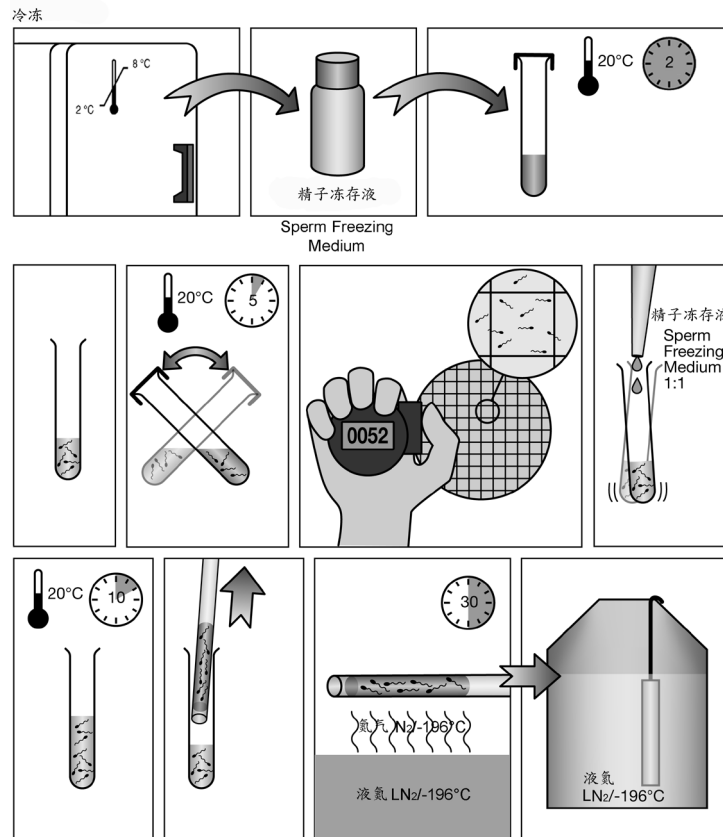

精子冻存液

Sperm Freezing Medium

用于冷冻精子和睾丸活检组织

含有：

人血白蛋白溶液 (HAS)

重组人胰岛素

硫酸庆大霉素 10 µg/mL

质量控制检测

无菌试验合格（欧洲药典；美国药典）

pH值检测合格（欧洲药典；美国药典）

内毒素试验合格， $\leq 0.1\text{EU/mL}$

（欧洲药典；美国药典）

HSA检验合格（欧洲药典；美国药典）

精子存活试验合格

注：每批次的结果记录于分析证书，

查询可登录 www.origio.com

贮存说明和稳定性

产品为无菌加工，无菌包装。

在原容器内于2-8°C避光贮存。

使用前请勿冷冻。

丢弃加温后多余（未使用的）的冻存液。

该产品请在开启后7天内使用。

若能按照产品生产商的说明进行贮存，在瓶子标签上显示的失效期以前产品性能稳定。

注意事项和警告

如果出现以下情况，请勿使用本品：

1. 产品包装出现损坏或密封破损。
2. 产品过期。

警告：所有血液制品应视为具有潜在感染性进行处理。经试验，发现用于生产本产品的原料无HBsAg反应，且抗-HIV-1/-2、HIV-1、HBV和HCV均阴性。此外，原料的细小病毒

B19检测无升高。没有任何已知的试验方法可以保证人体血液制品不会传播病原体。

注：为避免来自死亡精子等产生的细胞毒性，建议采集后很快就制备精液标本。

【使用说明】

冷冻：

1. 将精子冻存液于室温预温至少2个小时。
2. 液化后，测定射出精液的总体积，并对精液进行所需的分析。
3. 确保精液标本和精子冻存液处于室温中，并用精子冻存液将精液按1:1(v/v)的比例进行稀释。精子冻存液应逐滴加入到精液中，每加1滴后都小心将溶液混匀。
4. 将混合物在室温下至少保持10分钟。
5. 将稀释后的精液装入细管或冻存管，并按照生产商的建议进行密封。
非常重要是要给细管下部留出一定的空间来进行密封，这样也可允许在冷冻过程中溶液发生膨胀。
6. 在刚刚离开液氮表面的上方水平悬挂细管30分钟。冻存管应系于一个冻存管夹上，悬挂于液氮表面之上，时间相同。
7. 最后，将细管或冻存管移至液氮中，即将精液置于-196°C贮存。

解冻

1. 将冻存的细管或冻存管置于室温解冻5分钟。
2. 按照生产商的说明打开细管或冻存管，取出解冻的精液。
立即采用密度梯度法或上游法做精子准备。

（使用图示见下页）

标志：

加温后丢弃多余（未使用）的本瓶产品	
开启后7天内使用	
含有人白蛋白溶液	
如包装损坏请不要使用	

医疗器械注册证书编号：国械注进
20153541211

产品标准编号：YZB/DEN 0202-2015

产品型号：10670010F

生产企业名称：ORIGIO a/s

注册地址：Knardrupvej 2, 2760 Malov, Denmark (丹麦)

生产地址：Knardrupvej 2, 2760 Malov, Denmark (丹麦)

代理人名称：澳励晶贸易（上海）有限公司
代理人住所：上海市杨浦区翔殷路1088号
1201-1205室

联系人：金文荣

电话：021-65637022

传真：021-65637023