

0916-04

Ver. 4: 2021. Jan. 18

组织培养油 Oil for Tissue Culture

产品型号

ART-4008P

ART-4008-5P




CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive, Trumbull,
Connecticut 06611 USA


www.fertility.coopersurgical.com

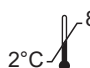
标识说明

 产品型号


 批号

 有效期 (年, 月, 日)


 一次性使用

 2°C - 8°C
贮藏温度

 无菌

 注意: 请阅读说明书。

 制造商

 **Rx Only** 本产品需凭借医生 (或有执照的操作者) 的医嘱购买。

本产品仅用于实验室操作, 做其他用途时必须由终端使用者认可。

| 产品名称 | 产品型号 | 规格 |
|-------|-------------|----------------|
| 组织培养油 | ART-4008P | 100 mL ×1 瓶 |
| | ART-4008-5P | 500 mL ×1 瓶 |

预期用途

产品主要用于辅助生育培养过程中覆盖组织培养液。

产品描述

组织培养油预期用于实验室操作, 可使相对惰性且不易混合的液体覆盖在少量的组织培养液中, 同时不影响通气。此类程序包括体外受精, 胚胎培养和微型操作过程如ICSI和辅佐孕育。组织培养油下使用小体积的培养液的好处包括: 培养液的水分蒸发量少, 在增加细胞密度时配子及胚胎培养, 和含贵重成分的较少量的培养液的应用。

成分

液体矿脂/石蜡油/低密度矿物油。
无菌过滤。

注意事项和警告

脂溶性成分如类固醇和脂溶性维生素会从液体培养液优先地渗进油层。溢出的产品可以用70%乙醇和纸巾除去溢出的产品。若瓶内出现颗粒物或微生物污染, 请勿使用。

注意: 胚胎是一个通用词语。准确来说, SAGE认为胚胎是从受精卵 (单个二倍体细胞) 融合父母双方的基因信息开始的, 随后受精卵进行重复有丝分裂形成固体桑椹胚 (一般第4-5天), 之后腔内充满液体形成囊胚 (一般第5-6天), 直至胚胎植入 (从受孕后第一周末开始至第二周末完成) 结束。

警告: 本产品需凭借医生 (或有执照的操作者) 的医嘱购买。

质量保证

通过单细胞鼠胚试验 (MEA), 单细胞生长到囊胚的百分率大于80%。通过美国药典细菌内毒素试验, 内毒素含量 <1EU/ mL。本产品可提供分析证书。

使用方法

建议用10% (v/v) 培养液均衡本产品, 在CO₂培养箱中培养一夜后, 用另一批培养液替换原培养液。再将平衡液放入培养箱中, 瓶口松开使达到气体平衡。各实验室应自主选择各个阶段使用的培养液。有关体外受精 (IVF) 方面, 胚胎培养及低温贮藏的产品请参见我们的产品目录。

贮藏方法及稳定性

贮藏于暗室内, 2-8°C存放。产品在标签上规定的有效期内是稳定的。

- 使用无菌操作方法取出适量的产品。
- 取出产品后不应把余下的倒回瓶中。
- 建议未开封的产品, 储存于2-8°C的暗室内。
- 如产品变色, 呈块状, 混浊, 或可能有微生物污染均不可使用。

相关产品

SAGE有一整套用于辅助生育的辅助生育产品。请致电或写信索取相关信息或我们最新的产品目录。询问技术问题或联系客服部请拨打SAGE热线。

请拨打SAGE热线:

美国: (800) -243-2974

国际: (203) -601-9818

医疗器械注册证号:国械注进 20193181774
产品技术要求编号:国械注进 20193181774
产品型号: ART-4008P, ART-4008-5P

注册人/生产企业名称: CooperSurgical, Inc.
库柏外科手术公司
注册人/生产企业住所: 95 Corporate
Drive, Trumbull, Connecticut 06611 USA
生产地址: Knardrupvej 2, 2760 Malov,
Denmark

代理人名称: 贝迪诺恩(北京)医药科技有
限公司
代理人住所: 北京市朝阳区建国门外大街
甲24号12层1501室
联系电话: 010-65155991
售后服务单位: 库博医疗科技(上海)有限公司
售后服务单位地址: 上海市静安区万航渡
路 889号 1508室

联系电话: 021-65637022
传真: 021-65637023
有效期: 2 年
生产日期: 见标签